



Clean air, our care

Sådan bruger du vores mundbind:

Trin 1: Vask hænderne grundigt med sæbe eller desinfektionsmiddel/Håndsprit før du tager mundbindet på.

Trin 2: Tag fat i øreelastikkerne og påfør mundbindet op mod dit ansigt, og op foran din mund. Tryk på metaltråden for at tilpasse formen på din næse, og træk mundbindet ned over din hage. Undgå at røre ved selve mundbindet når du tager det på.

Trin 3: Når du skal tage mundbindet af, skal du undgå at røre ved selve mundbindet. Tag fat i øreelastikkerne og smid straks mundbindet i en lukket skraldespand.

Trin 4: Rengør dine hænder grundigt med sæbe eller desinfektionsmiddel/Håndsprit

Dette produkt er til engangsbrug og kan ikke genbruges efter rengøring.

Mundbindet skal holdes så fladt som muligt. Metaltråden på mundbindet skal ikke foldes ofte.

Opbevar dette produkt i et rent, hygiejnisk, ventileret og tørt miljø

Anbefal opbevaringsbetingelse: 5 ° C - 40 ° C

Relativ temperatur under 80%



Clean air, our care

3-Lags mundbind

Vores mundbind er produceret af Hollandske Afpro Filters, som blandt andet er kendte for at producere FFP2 masker til Hollandske sundhedsinstitutioner.

Mundbindende er sammensat af 3 beskyttende lag, og indeholder det velkendte filtermateriale, smeltet polypropylen. Dette mundbind har en BFE (Bakteriefiltreringseffektivitet) på >99%, som er testet og bekræftet af et uafhængigt forskningslaboratorium.

Mundbindet er testet iht. EN14683

Mundbindet er egnet til privatbrug, offentlige områder, offentlig transport og andre steder hvor det er svært at holde 1,5 meters afstand.

På vores hjemmeside www.filternew.dk kan du finde mere info samt video vejledning for brug af vores mundbind.



FILTER SOLUTIONS FOR HOME AND WORK